

Iso Clenny spray Soluzione isotonica 100 ml con doppio erogatore

Contenuto della confezione

Flacone da 100 ml, doppio erogatore, foglietto illustrativo.

Indicazioni

Iso Clenny spray è una soluzione isotonica (0,9%) pressurizzata con gas, che contiene acqua di mare della Corrente del Golfo e acqua depurata.

Iso Clenny spray è indicato per la detersione quotidiana del naso di neonati, bambini e adulti, per prevenire infezioni delle prime vie respiratorie ed esercita una funzione benefica per la decongestione, fluidificazione della mucosa nasale in caso di raffreddore comune, riniti acute infettive ed allergiche e rinosinusiti. Inoltre, grazie alla presenza del doppio erogatore, può essere utilizzato per la pulizia ed il lavaggio dell'orecchio esterno prevenendo la formazione di tappi di cerume.

Composizione

Un flacone da 100 ml contiene:
acqua di mare della Corrente del Golfo, acqua depurata, gas propellente inerte (azoto).

Non contiene conservanti.

IGIENE DEL NASO


Iso Clenny spray è particolarmente indicato:

- per detergere con delicatezza il naso per prevenire infezioni delle prime vie respiratorie;
- per decongestionare le mucose nasali in caso di raffreddore, riniti acute infettive ed allergiche e rinosinusiti;
- per idratare e ripristinare l'umidità naturale del naso;
- per favorire la respirazione, soprattutto in caso di naso chiuso o secco.



Modo d'uso

1. Togliere il cappuccio protettivo della bombola e inserire l'apposito erogatore (vedere figura sopra) sulla valvola.
2. **Adulti e bambini** in grado di utilizzare autonomamente il prodotto: si consiglia di inclinare la testa da un lato e inserire l'erogatore nella narice rivolta verso l'alto, mantenendo la bombola in posizione verticale. Ripetere l'operazione con l'altra narice. Se il lavaggio è stato effettuato in maniera corretta, si avvertirà il passaggio della soluzione nella parte alta del naso.
3. **Neonati e bambini piccoli:** distendere il bambino su un fianco. Mantenendo la bombola in posizione verticale, inserire l'erogatore nella narice superiore e premere dolcemente. Distendere il bambino sull'altro fianco e ripetere la procedura con l'altra narice.
4. Rimuovere le secrezioni con un fazzoletto o con aspiratore nasale **Clenny A**.
5. Dopo l'uso lavare l'erogatore con acqua calda ed asciugare.

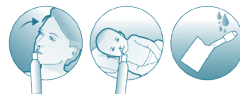

Frequenza d'uso


Si consigliano 1/2 nebulizzazioni per narice, più volte al giorno secondo necessità.

Ultima revisione del foglietto illustrativo: Febbraio 2021

IGIENE DELL'ORECCHIO

Iso Clenny spray è particolarmente indicato:

- per il lavaggio e la pulizia dell'orecchio di bambini ed adulti;
- per prevenire la formazione di tappi di cerume;
- per ridurre la consistenza del tappo di cerume e facilitarne così l'estrazione da parte del medico.

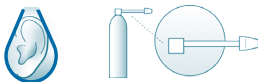

Modo d'uso

1. Togliere il cappuccio protettivo della bombola e inserire l'apposito erogatore (vedere figura sopra) sulla valvola.
2. Tenendo il capo inclinato, introdurre l'imboccatura dell'erogatore nel condotto uditivo esterno senza spingere e premere sulla valvola.
3. Massaggiare per alcuni secondi alla base dell'orecchio.
4. Asciugare delicatamente con una salviettina pulita.
5. Dopo l'uso lavare l'erogatore con acqua calda ed asciugare.



Frequenza d'uso

Si consigliano 2/3 applicazioni a settimana per orecchio.

Avvertenze

- Non utilizzare in caso di ipersensibilità a uno qualsiasi dei componenti.
- Non utilizzare se la confezione o il flacone appaiono danneggiati.
- Recipiente sotto pressione. Proteggere dai raggi solari e non esporre ad una temperatura superiore ai 50°C. Non perforare né bruciare, neppure dopo l'uso.
- Impiegare il prodotto esclusivamente per l'uso cui è destinato.
- Non vaporizzare su fiamma o su corpo incandescente.
- Non disperdere nell'ambiente il contenitore dopo l'uso.
- Il flacone è pressurizzato ed il suo contenuto è erogabile attraverso una valvola che non ne permette il riflusso.
- Non utilizzare dopo la data di scadenza riportata sulla confezione.
- Per l'igiene dell'orecchio: non utilizzare in caso di disturbi dell'equilibrio, di perforazione del timpano, otite, presenza di corpi estranei nell'orecchio o in seguito ad interventi chirurgici dell'orecchio.
- Tenere fuori dalla portata dei bambini.

Effetti indesiderati

L'utilizzo del dispositivo può causare rari eventi di natura lieve e transitoria nella normalità dei casi, come: irritazione, prurito o bruciore.

- In casi eccezionali rari sono stati riferiti episodi di: sanguinamento (epistassi), mal di testa, rinorrea in caso di utilizzo nasale;
- vertigine, sanguinamento o perforazione del timpano in caso di utilizzo auricolare.

Interrompere immediatamente l'uso del prodotto al verificarsi di tali eventi o di qualsiasi evento non precedentemente elencato e, se i sintomi persistono, consultare il medico.

Conservazione

Conservare in luogo fresco ed asciutto, lontano da fonti di calore dirette; non esporre a luce solare diretta.

Chiesi
CONSUMER HEALTHCARE

Marco Antonetto S.p.A.
Via Arsenale, 29 - 10121 Torino (TO) Italy
Distribuito da: Chiesi Italia S.p.A.
Via G. Chiesi, 1 - 43122 Parma (PR) Italy

PRESERVA
LA FASCIA D'OZONO



PAP

PAP 22, Raccolta carta - Verifica
le disposizioni del tuo comune

CE

0108008763/01

0426