

# Clenny® A

Aspiratore nasale per neonati  
Kit aspiratore + 3 beccucci ricambio



Beccuccio morbido con  
barriera antimicrobica\*



Chiesi

## Clenny® A

Aspiratore nasale per neonati

Libera il nasino dalle secrezioni  
facilitando sonno e poppata.



Fare riferimento alle istruzioni prima dell'uso.

Tutti i componenti del Kit sono privi di ftalati e di bisfenolo A.

### INDICAZIONI D'USO

La presenza di muco nei bambini più piccoli, che non sono ancora in grado di soffiarsi il nasino, favorisce la proliferazione di virus e batteri.

Quando il nasino è chiuso, il bambino può manifestare difficoltà all'allattamento e ad un sonno sereno.

L'aspiratore nasale Clenny A è un dispositivo medico, facile da usare, sicuro per il bambino grazie al morbido beccuccio ed offre una soluzione immediata alla mamma per l'eliminazione del muco. Può essere utilizzato più volte nella giornata in base all'ostruzione del nasino.

### MODO D'USO

1. Lavare bene le mani prima del suo utilizzo.
2. Unire e fissare il beccuccio flessibile con l'impugnatura.



3. Appoggiare l'estremità del beccuccio nella narice del neonato/bambino.
4. Aspirare regolarmente dal boccaglio, fino a liberare il nasino.
5. Ripetere la stessa operazione nell'altra narice.
6. Rimuovere il beccuccio morbido e inserire un nuovo beccuccio.
7. Per facilitare l'aspirazione, umidificare il nasino con Iso Clenny soluzione isotonica .

### AVVERTENZE

Verificare che le parti staccabili siano ben connesse tra loro. Utilizzare solo in presenza di un adulto e tenere lontano dalla portata dei bambini: contiene piccole parti che possono essere ingerite. Conservare a temperatura ambiente. Non utilizzare se il beccuccio o le altre parti sono danneggiate. Tenere lontano da fonti di calore. Non sterilizzare a caldo. Non utilizzare dopo la data di scadenza indicata sulla confezione. L'eventuale opacità del beccuccio è dovuta allo speciale trattamento con argento nanomolecolare.

### CONTIENE

- n.1 Boccaglio anatomico di aspirazione (A)
- n.1 Tubo flessibile (B)
- n.1 Base con impugnatura (C)
- n.3 Beccucci morbidi usa e getta (D)

### RICAMBI


Sono disponibili confezioni da 10 o da 20 beccucci morbidi usa e getta comprensivi di filtro antimicrobico.

PRODOTTO TESTATO



Crab Sinergy S.r.l.  
Via Marco Polo 18  
24062 Costa Volpino  
(BG) Italy

Distribuito da:  
Chiesi Farmaceutici S.p.A.  
Via Palermo 26/A  
43122 Parma (PR) Italy

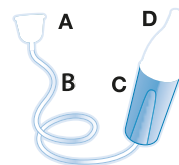

0108000718/01

\* Grazie allo speciale filtrino trattato con argento nanomolecolare

